



ALERE™ TESTPACK +PLUS HCG URIN MIT OBC
ALERE™ TESTPACK +PLUS HCG COMBO MIT OBC

ERGEBNISSE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Zuverlässiger und schneller Nachweis
einer frühen Schwangerschaft



ZUVERLÄSSIGE TESTDURCHFÜHRUNG

Alere™ TestPack +Plus hCG liefert hochsensitive Testergebnisse in Form eines einfachen Plus- oder Minuszeichens (+ oder -). Dank der einzigartigen on-board Qualitätskontrollen und des Testende-Fensters, aus der hervorgeht, wann das Testergebnis abgelesen werden kann, können Sie sich jederzeit bei jedem Test sicher sein.

Im Gegensatz zu anderen Schnelltests, die lediglich eine Verlaufskontrolle enthalten, verfügen die Alere TestPack +Plus hCG-Tests über integrierte Positiv- und Negativkontrollen, die die ordnungsgemäße Funktion der Tests sicherstellen:

- Stellt die Gültigkeit der Ergebnisse sicher
- Überwacht den Probenfluss
- Negativkontrolle prüft auf störende Substanzen

Mit seinen bewährten Leistungen ist das Alere TestPack +Plus hCG die ideale Wahl für alle Gesundheitseinrichtungen (Klinik, Labor, Point-of-Care):

- Der einzige Test mit integrierten Positiv- und Negativkontrollen für noch zuverlässigere Testergebnisse.
- Ergebnisse als Plus- oder Minuszeichen (+ oder -) zur einfachen Interpretation.
- Mehr als 99 % Sensitivität und Spezifität für zuverlässige klinische Leistung.
- Als Urin- oder Serumtest[†] für flexible Probennahme erhältlich.

GENAUE, ZUVERLÄSSIGE ERGEBNISSE, DENEN SIE VERTRAUEN KÖNNEN

Die Alere™ TestPack+Plus hCG-Tests zeigten in Studien eine relative Sensitivität und eine relative Spezifität von mehr als 99 %.

		ALERE TESTPACK +PLUS HCG URIN MIT OBC	
		+	-
EIN ANDERER HANDELSÜBLICHER HCG COMBO-TEST	+	131	0
	-	0	169

		ALERE TESTPACK +PLUS HCG COMBO MIT OBC		ALERE TESTPACK +PLUS HCG COMBO MIT OBC (SERUM)	
		+	-	+	-
EIN ANDERER HANDELSÜBLICHER HCG COMBO-TEST	+	126	0	110	0
	-	1	168	0	76



SENSITIVITÄT

Alere TestPack +Plus hCG kann hCG in Proben ab einer Konzentration von mindestens 25 mIE/ml nachweisen.



SPEZIFITÄT


In Untersuchungen zeigten die Alere TestPack +Plus hCG Tests keine Kreuzreaktionen mit verschiedensten Substanzen, wie z.B. anderen Hormonen aus Urin und Serum¹.




EINFACHES TESTVERFAHREN

Das Testverfahren für das Alere TestPack +Plus hCG besteht aus nur drei einfachen Schritten.

1 Probe nehmen
(Urin oder Serum†)

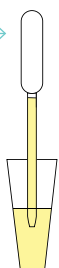


2 In die Probenmulde
übertragen

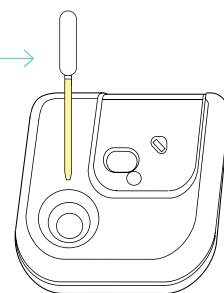


3 Testergebnisse ablesen

Positives Testergebnis

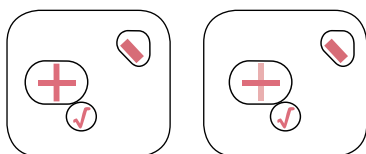

Das Pluszeichen (+) bedeutet ein positives Testergebnis.

Negatives Testergebnis

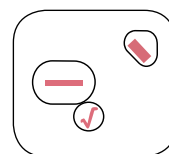


Das Minuszeichen (-) bedeutet ein negatives Testergebnis.

SIHTBARE GENAUIGKEIT



**PLUS-/MINUS-
ERGEBNISSE**
Einfach
abzulesende
Testergebnisse.

NEGATIV-KONTROLLE
Weist auf
eine mögliche
Störsubstanz hin,
die ein ungültiges
Ergebnis
verursacht.

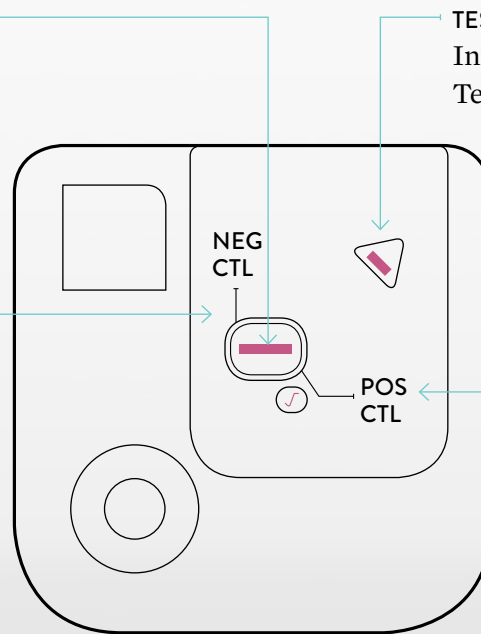

TESTENDE-FENSTER
Informiert Sie, dass die
Testergebnisse abgelesen
werden können
(nur bei Urin).

POSITIV-KONTROLLE
In allen gültigen
Tests sichtbar,
unabhängig
davon, ob hCG
nachgewiesen
wurde oder nicht.

ALERE™ TESTPACK +PLUS HCG PRODUKTINFORMATIONEN

	ALERE TESTPACK +PLUS HCG URIN MIT OBC	ALERE TESTPACK +PLUS HCG COMBO MIT OBC
Katalog-Nr.	505798J	505805J
Anzahl der Tests	20 Tests	20 Tests
Lagerung	2-30 °C	2-30 °C
Probentyp	Urin	Urin oder Serum
Ergebnis verfügbar	bei Testende	5 Minuten
Sensitivität	25 mIE/ml hCG	25 mIE/ml hCG
Spezifität	100 %*	>99 %*

* Relative Sensitivität und Spezifität im Vergleich zu einem anderen professionellen Schwangerschaftstest.

† Serumprobenverarbeitung nur beim Alere™ TestPack hCG Combo mit OBC möglich.

Alere GmbH
Am Wassermann 28, D-50829 Köln, Tel: +49 221 27143-0, Fax: +49 221 27143-400, serviceDE@abbott.com
Estermannstr. 17, A-4020 Linz, Tel: +43 0732-771077, Fax: +43 0732-7710772391, serviceAT@abbott.com
Moosacherstrasse 14, CH-8804 Au-Wädenswil, Tel: +41 44 782 60 70, Fax: +41 44 782 60 77, infoCH@abbott.com

© 2019 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle erwähnten Warenzeichen sind entweder Marken der Abbott Unternehmensgruppe oder der jeweiligen Unternehmen.
Alle abgebildeten Fotos dienen nur illustrativen Zwecken. Jede in diesen Fotos dargestellte Person ist ein Modell. IDEM229109 7000210-02 08/19

