



BD Microtainer[®] Sicherheitslanzette

Sichere und schmerzarme Kapillarblutentnahme





Einfach

Die BD Microtainer® kontaktaktivierte Lanzette mit ihrem ergonomischen Design liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Lokalisierung der Punktionsstelle. Die intuitive Handhabung erfordert wenig Erklärungsbedarf. Die Lanzette wird einfach durch leichten Druck auf die Punktionsstelle aktiviert. Die Punktion erfolgt blitzschnell und die scharfe Spitze zieht sich danach sofort wieder automatisch ins Gehäuse zurück.

Schmerzarm

Eine Studie hat gezeigt, dass diese Lanzette signifikant weniger Schmerzen verursacht als vergleichbare Produkte.*

Sicher


Die Einstichtiefe ist bereits eingestellt und kann vom Anwender zum Schutz vor Knocheninfektionen nicht beeinflusst werden. Die BD Microtainer® kontaktaktivierte Lanzette ist aus Sicherheitsgründen so konzipiert, dass sie nur einmal benutzt werden kann. Somit ist auch eine Verletzungsgefahr nach Gebrauch ausgeschlossen.

* Quelle: BD Clinical Documentation VS 7499

Gebrauchsanleitung


1.

Reinigen Sie die vorgesehene Punktionsstelle und lassen Sie sie trocknen. Dann ziehen Sie die Versiegelung der Lanzette mit einer Drehbewegung ab.

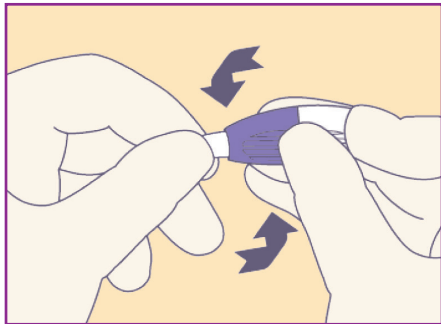


2.

Setzen Sie die Sicherheitslanzette auf die gewünschte Punktionsstelle

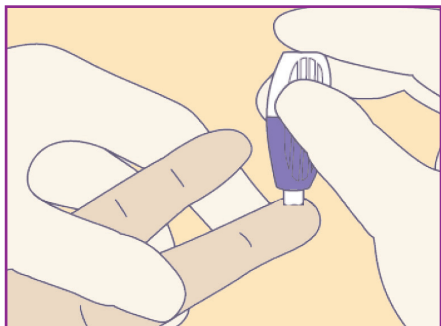

3.

Drücken Sie die Sicherheitslanzette fest gegen die Punktionsstelle.

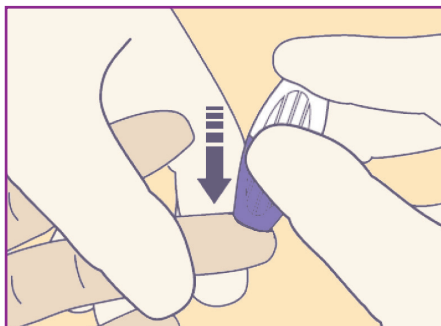

BD Microtainer® Sicherheitslanzette

Farbe	Bestellnummer	Größe	Blutvolumen	Verpackungseinheit
	366592	30G Kanüle, 1,5 mm Stechtiefe	geringer Blutfluss, einzelner Tropfen	200 Stück pro Schachtel
	366593	21G Kanüle, 1,8 mm Stechtiefe	mittlerer Blutfluss	200 Stück pro Schachtel
	366594	Klinge: 1,5 mm Breite x 2 mm Tiefe	stärkerer Blutfluss	200 Stück pro Schachtel



Verpackungseigenschaften:

- Perforierter Spender zur einfachen Entnahme
- Standardöffnung an der Oberseite

Deutschland:

BD · Tullastr. 8 – 12 · 69126 Heidelberg
Tel. 06221 305 0 · Fax 06221 305 216

Österreich:

BD · Rinnböckstr. 3 · 1030 Wien
Tel. 01 7063660 0 · Fax 01 7063660 30

Schweiz:

BD · Binnigerstrasse 94 · 4123 Allschwil
Tel. 061 485 22 22 · Fax 061 485 22 00

bd.com

